

## Uputa za uporabu

### Bepanthol® kapi za oči

kapi za oči s natrijevim hijaluronatom (0,15 %) i dekspantenolom (2 %)

#### OPIS

**Bepanthol® kapi za oči** stvaraju na rožnici oka sterilan, viskozno elastičan i proziran zaštitni film bez konzervansa. **Bepanthol® kapi za oči** sadrže natrijev hijaluronat, tj. natrijevu sol hijaluronske kiseline, uslijed čijih fizikalnih svojstava se na rožnici stvara ravnomjeran, stabilan i postojan zaštitni film, a da se ujedno ne smanjuje sposobnost vida. **Bepanthol® kapi za oči** sadrže i provitamin B5 (dekspantenol) koji ima sposobnost vezivanja velike količine vode, vlaži i njeguje oko s jedne strane, dok s druge strane zajedno s natrijevim hijaluronatom zadržava vlagu.

Mješavina natrijeva hijaluronata (koji stabilizira suzni film) i dekspantenola (koji njeguje i smiruje oko) štiti i vlaži površinu oka te je podmazuje.

**Bepanthol® kapi za oči** tako dugoročno ublažavaju tegobe kod:

- mehaničkih opterećenja kao posljedice nošenja tvrdih ili mekih kontaktnih leća ili dijagnostičkih pretraga očiju
- promjena okoline (tzv. okolinski stres), prouzročeni djelovanjem klimatizacijskih uređaja, vjetra, hladnoće, suhog ili zagađenog zraka (npr. dimom cigareta)
- preopterećenja očiju kao posljedice rada na računalu, mikroskopu ili tijekom dugotrajnog upravljanja motornim vozilom.

**Bepanthol® kapi za oči**® ne sadrže konzervanse, stoga ih korisnici dobro podnose i nakon dugotrajne uporabe.

**Bepanthol® kapi za oči** primjerene su i za osobe koje nose kontaktne leće. Prije uporabe kapi za oči, kontaktne leće ne trebaju se ukloniti iz očiju.

#### UPORABA

Jednokratnu dozu otkinite s vrpce. Kod svake jednokratne doze provjerite je li spremnik neoštećen. Kako bi otvorili jednokratnu dozu, okrenite zatvarač (nemojte ga povlačiti). Nagnite glavu malo unatrag, pogledajte prema gore i lagano povucite donji kapak tako da ga odmaknete od oka. Ukapajte po jednu kap u spojničnu vrećicu oka 3 do 5 puta dnevno. Polako zatvorite oko kako bi se tekućina ravnomjerno razlila po njegovoj površini. Ako se tegobe pogoršaju ili ne poboljšaju, molimo posavjetujte se s oftalmologom!



## SASTAV

1 ml sadrži: natrijev hijaluronat 0,15 %, dekspantenol 2 %, natrijev klorid, natrijev citrat, limunska kiselina, voda za injekcije.

## VELIČINA PAKIRANJA

Maloprodajno pakiranje: 20 jednokratnih doza po 0,5 ml.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Proizvod ne upotrebljavajte ako je spremnik jednokratne doze oštećen ili ako je oštećena vrećica.
- Ne dodirujte oko sa spremnikom jednokratne doze.
- Proizvod ne upotrebljavajte ako ste alergični na bilo koji od njegovih sastojaka. U vrlo rijetkim slučajevima primjena kapi za oči može uzrokovati iritaciju vrlo osjetljivih očiju.
- Samo za jednokratnu uporabu; budući da **Bepanthol® kapi za oči** ne sadrže konzervanse, sva otopina koja nije iskorištena odmah nakon prvog otvaranja mora se baciti.
- Ako uz ovaj proizvod koristite druge kapi ili masti za oči, između uporabe jednog i drugog proizvoda mora proći najmanje 15 minuta. **Bepanthol® kapi za oči** uvijek upotrijebite posljednje.
- Ne upotrebljavajte ako su Vam oči ozlijeđene ili inficirane.
- Nakon uporabe proizvoda Vaš vid može biti privremeno zamagljen. Nemojte voziti automobil ni upravljati strojevima i uređajima, već pričekajte dok se Vaša sposobnost vida u cijelosti vrati u normalno stanje.
- Kapi za oči nemojte koristiti nakon isteka roka uporabe. Rok uporabe označen je na svakoj jednokratnoj dozi, na vrećici i na kutiji.


## ČUVANJE PROIZVODA

Čuvajte na temperaturi između 2 °C i 25 °C.

Ne smije se zamrzavati.

Zaštitite od svjetlosti tako da jednokratne doze i vrećice čuvate u kutiji.

**LOT**

Broj serije (LOT) i  rok uporabe navedeni su na svakoj jednokratnoj dozi.

**STERILE A**


aseptična proizvodnja



samo za jednokratnu uporabu



Za opis i način uporabe pročitajte priloženu uputu za uporabu.

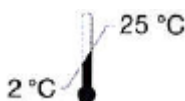

Proizvod ne upotrebljavajte ako su oštećeni spremnik jednokratne doze ili vrećica.



**PROIZVOĐAČ**

Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Njemačka

**DISTRIBUTER**

Bayer d.o.o.  
Bravničarjeva 13  
1000 Ljubljana  
Slovenija

CE 0483

**Datum revizije teksta:** 05/2017